

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben von der Firma **Schuster Schalk** ein für Sie individuell gefertigtes **orthopädisches Qualitätsprodukt** erhalten. Es wurde mit höchster Sorgfalt hergestellt und in Einzelfertigung speziell für Ihre Bedürfnisse angepasst. Da Sie darauf genauso gut Acht geben sollen wie auf Ihre Füße, haben wir anbei noch einige Tipps und Hinweise zur Pflege und Handhabung.

Allgemeine Anwendungshinweise

Unsere Empfehlungen für eine erfolgreiche Therapie und optimale Funktion orthopädischer Produkte:

- ✓ Sie und Ihre Füße brauchen Zeit zum Gewöhnen. Wenn Sie das erste Mal Schuheinlagen, zugerichtete Konfektionsschuhe, Innenschuhe oder orthopädische Maßschuhe erhalten, tragen Sie diese zu Beginn nur stundenweise.
- ✓ Bei starker Beanspruchung sollten Einlagenüberzüge bzw. Sohlen aus hygienischen Gründen regelmäßig ausgetauscht werden. Achten Sie generell auf Materialermüdung der Polster und Fußbettungen, sie sollten bei Bedarf rechtzeitig erneuert werden.
- ✓ Nasse Heilbehelfe nur bei Raumtemperatur trocknen. Hitze kann viele Materialien verändern bzw. hart und spröde werden lassen. Bitte trocknen Sie die Heilbehelfe NICHT direkt an Wärmequellen, wie Ofen, Föhn oder Heizkörper.
- ✓ Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir bei Schuhen die Verwendung von Schuhstreckern.
- ✓ Kontrollieren Sie täglich, ob sich Kleinteile wie z.B. Steine etc. im Schuh befinden und entfernen Sie diese umgehend, damit das Produkt nicht beschädigt wird.
- ✓ Achten Sie auf Rötungen, Druckstellen oder Hautveränderungen auf Ihren Fußsohlen. Im Zweifelsfall kommen Sie bitte schnellstmöglich für eine Analyse zu uns.

Orthopädische Schuheinlagen/Bettungseinlagen Diabetiker

- ✓ Nur in dafür geeigneten Schuhen verwenden.
- ✓ Zu enge oder zu breite und stark abgenutzte Schuhe vermeiden.
- ✓ Einlagen und Absatz müssen zueinander passen, damit auch die gewünschte Wirkung eintreten kann.

Sicherheitseinlagen und Zurichtung von Sicherheitsschuhen

- ✓ Schuheinlagen für Arbeitssicherheitsschuhe müssen den bestehenden Baumuster-Prüfnormen der **ÖNORM Z1259 von 2012** entsprechen. Somit ist es nicht mehr erlaubt, gewöhnliche orthopädische Einlagen in Sicherheitsschuhen zu tragen. Sollten aufgrund von Fehlstellungen orthopädische Einlagen notwendig sein, müssen diese vom Orthopädienschuhmacher in Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Sicherheitsschuhe angepasst werden, andernfalls verliert dieser seine Rechtskonformität.
- ✓ Orthopädische Einlagen für Sicherheitsschuhe können dazu beitragen, Schmerzen zu reduzieren und Folgeschäden am Bewegungsapparat vorzubeugen.
- ✓ Nur in dafür geeigneten und passenden Sicherheitsschuhen verwenden.
- ✓ Zu enge oder zu breite und stark abgenutzte Schuhe vermeiden.

Schuhzurichtung

- ✓ Schuhe immer fest verschließen, damit Ihre Füße nicht nach vorne rutschen können.
- ✓ Die Schuhzurichtung wirkt als Abstützung und Verstärkung der Längs- und Quergewölbe im Fuß, zusätzlich kann sie das Abrollen des Fußes beim Gehen unterstützen.
- ✓ Achtung! Bei Schaftversteifungen bzw. Erhöhungen oder Sohlenkorrekturen, kann es beim Treppensteigen oder Autofahren zu Einschränkungen kommen.

Orthopädische Maßschuhe/Maßschuhe mit Diabetesausstattung

- ✓ Schuhe immer fest verschließen, damit Ihre Füße nicht nach vorne rutschen können.
- ✓ Im Schuh liegende Einlagen sind ein fester Bestandteil des Schuhs und dürfen nur zum Trocknen herausgenommen werden.
- ✓ Lassen Sie Ihre orthopädischen Maßschuhe täglich über Nacht ablüften.
- ✓ Vermeiden Sie abgetretene und schräggetretene Schuhe. Sie können Schmerzen in den Gelenken verursachen. Bringen Sie abgenutzte Schuhe bitte umgehend zu uns zur Reparatur.
- ✓ Achtung! Bei Schaftversteifungen bzw. Erhöhungen oder Sohlenkorrekturen kann es beim Treppensteigen oder Autofahren, zu Einschränkungen kommen.
- ✓ Bei Verschleißerscheinungen im Oberleder-, Futter- oder Sohlenbereich wenden Sie sich bitte zeitnah an uns.

ICP-Schuhe

- ✓ Bei ICP-Schuhen handelt es sich meist um industriell vorgefertigte Therapieschuhe, welche in verschiedenen Weiten und Schaftmaßen erhältlich sind. Diese werden von uns individuell angepasst, zum Beispiel durch Einbau einer Einlage und Anpassung der Sohle.
- ✓ Schuhe immer fest verschließen, damit Ihre Füße nicht nach vorne rutschen können.
- ✓ Achtung! Bei Schaftversteifungen bzw. Erhöhungen oder Sohlenkorrekturen, kann es beim Treppensteigen oder Autofahren, zu Einschränkungen kommen.
- ✓ Bei Verschleißerscheinungen im Oberleder-, Futter- oder Sohlenbereich wenden Sie sich bitte zeitnah an uns.

Orthopädische Innenschuhe

- ✓ Innenschuhe und darüberliegende Konfektions- oder Maßschuhe immer fest verschließen, damit Ihre Füße nicht nach vorne rutschen können.
- ✓ Achtung! Bei Schaftversteifungen oder Sohlenkorrekturen, kann es beim Treppensteigen oder Autofahren, zu Einschränkungen kommen.

Reinigungshinweise für orthopädische Maßschuhe

Die orthopädischen Maßschuhe sind je nach Material, unterschiedlich zu pflegen. Rauleder-/ Wildlederschuhe sind am besten mit einer feinen Krepp- oder Drahtbürste zu reinigen und danach mit Imprägniersprays zu behandeln. Glattlederschuhe können mit entsprechenden Schuhcremes gepflegt werden. Für die richtige Produktauswahl wenden Sie sich gerne an unser Fachpersonal. Das Innenfutter kann bei größeren Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel oder scharfe Reinigungsmittel im Oberleder- und Futterbereich.

Um die beste Wirkungsweise unserer Produkte zu garantieren, empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle durch unser Fachpersonal!